

iD for men

Level 1+, 2, 3

sanicare 
your daily life




iD for men passar till män med små till medelstora urinläckage. Tejprensma som håller skyddet på plats (används tillsammans med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong).

Användarinstruktioner finns på tejprensman och på innerförpackningen, vilket underlättar och ger en bra användarinstruktion för brukaren. Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet som främjar god hudhälsa. Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material runt hela produkten för att minska risken för hudirritationer. Produkten är dermatologisk testad.



Varumärke	iD		
Benämning	iD for men Level 1+	iD for men Level 2	iD for men Level 3
Sanicare art nr	5221035100	5221040100	5231050140
Mått	B8-18 x L30 cm	B8-18 x L30 cm	B10-23 x L29 cm
Antal produkter/förpackning	10 st	10 st	14 st
Antal produkter/transportförpackning	160 st	160 st	168 st
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1	385 ml	430 ml	653 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3	128,3 ml	143,3 ml	217,6 ml
Absorptionsmaterial	Fluffmassa, superabsorbenter		
Ytskikt	Non-woven av polypropylen		
Spärrskikt	Polyeten		
Förvaring	Rumstemperatur		
Kassering	Brännbart avfall. Får <u>ej</u> spolas ner i toaletten		
Övrigt	Produkten innehåller inte PVC. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.		

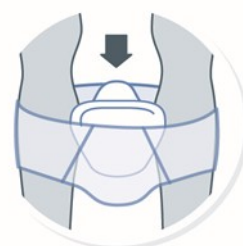

Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten fästs i kalsongen/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.
- Singelförpackad

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

SWEDISH
Medtech



Art.nr.
5221035100,
5221040100,
5231050140



sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se



Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden. Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning av storlek är viktig för bästa funktion.

Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.