

# MerryGrip griptång

Art nr: 144108, 144110, 144111, 144112,  
144115, 144116, 144117

**Avsedd användning:** MerryGrip griptång används av personer med nedsatt rörelseförmåga eller som har svårt att nå saker.

## Produktvarianter

Art.nr	Färg	Längd (cm)	Modell	Vikt (g)
144108	Grå	40	Aktiv	120
144110	Grön	60	Aktiv	160
144111	Röd	70	Aktiv	180
144112	Blå	80	Aktiv	200
144115	Grön	60	Passiv	160
144116	Röd	70	Passiv	180
144117	Blå	80	Passiv	200



## Produktbeskrivning

- Utrustad med gripgummi på båda klorna, vilket gör det enkelt att greppa föremål.
- Under handtaget finns en gummiklädd kant som gör det möjligt att hänga griptången över exempelvis en bordskant.
- I änden av handtaget sitter en magnet som underlättar upplöckning av metallföremål, såsom nycklar och gem från golvet.

### Aktiv modell

Den aktiva modellen är avsedd för personer som kan trycka ihop handtaget och hålla det intryckt under hela användningen.

#### Användning:

1. Placera klorna runt föremålet och håll handtaget intryckt för att behålla greppet.
2. Släpp handtaget – föremålet frigörs då från klorna.

### Passiv modell

Den passiva modellen är avsedd för personer som har svårt att hålla handtaget intryckt under hela momentet.

#### Användning:

1. Tryck ihop handtaget för att öppna klorna i griptångens ände.
2. Placera klorna runt föremålet.
3. Släpp handtaget – klorna stängs automatiskt och greppar föremålet.
4. För att frigöra föremålet, tryck ihop handtaget.

**SWERECO**

Swereco AB, Vagnvägen 4,  
SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com  
+46 (0)8 5000 5240

#### IFU 2026-25 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.  
<https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/grepphjalpmedel/griptanger>

**Teknisk data**

Tjocklek rör: 5 mm

Material: polyamid (handtag aktiv), ABS plast (handtag passiv), aluminium (rör)

Förväntad livslängd: 2 år vid normal användning

Förvaring: rumstemperatur

Återvinning och avfall: sorteras efter lokal anvisning

**Reservdelar**

MerryGrip Gripgummi (Art.nr 144122)

**Säkerhetsanvisningar**

- Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av produkten får göras.
- Produkten skall inte användas för att:
  - bryta eller skruva med
  - förflytta tunga föremål
  - förflytta heta eller farliga vätskorDå det finns risk att användaren skadas.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

**Underhåll**

- Regelbunden kontroll av gripgummi. Ett trasigt eller saknat gripgummi påverkar effekten av produkten och kan resultera i att föremålen glider ur griptångens klor.
- Produkten skall regelbundet kontrolleras. Vid tecken på slitage eller skada skall produkten kasseras.

**Rengöring**

- Rengör produkten med mild tvällösning (pH 5–9) och mjuk trasa regelbundet. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten.
- Vid byte mellan brukare ska griptången rengöras med desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol (ej gripgummit)
- Griptången tål inte varmvatten/ånga över 65°C



Produktens artikelnummer



Produktens utgångsdatum



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Produktens partinummer



Tillverkare



Konsultera bruksanvisning

**SWERECO**

Swereco AB, Vagnvägen 4,  
SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com  
+46 (0)8 5000 5240

**IFU 2026-25 ver 01**

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.  
<https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/grepphjalpmedel/griptanger>