

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Lakansskydd

Art.nr: 1169-S, 1169-M, 1169-L,  
12221-S, 12221-M, 12221-L,  
1168-S, 1168-M, 1168-L

Vårt bassortiment av lakansskydd består av tre olika lakansskydd som i sin tur har tre olika storlekar. Ett lakansskydd är till för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage. Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck. Bädda alltid in bäddflikarna under sängen för bästa komfort och säkerhet.



Varumärke	Absorba								
Benämning	Absorba Lakansskydd Eldner			Absorba Lakansskydd Brage			Absorba Lakansskydd Lina		
Lakansskyddets egenskaper	Lakansskydd som är bra för små läckage, ett all-around skydd			Lakansskydd som är bra för medium till större läckage			Lakansskydd som är bra för större läckage		
Art nr	<b>1169-S</b>	<b>1169-M</b>	<b>1169-L</b>	<b>12221-S</b>	<b>12221-M</b>	<b>12221-L</b>	<b>1168-S</b>	<b>1168-M</b>	<b>1168-L</b>
Totalyta (BxL)	190 x L85 cm	215 x 85 cm	250 x 85 cm	190 x 85 cm	215 x 85 cm	250 x 85 cm	190 x 85 cm	215 x 85 cm	250 x 85 cm
Absorberande yta (BxL)	90 x 85 cm	115 x 85 cm	150 x 85 cm	90 x L85 cm	115 x 85 cm	150 x 85 cm	90 x 85 cm	115 x 85 cm	150 x 85 cm
Sängbredd	90 cm	120 cm	150 cm	90 cm	120 cm	150 cm	90 cm	120 cm	150 cm
Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015	1537 ml (+/- 43 ml)			1668 ml (+/- 49 ml)			1782 ml (+/- 56 ml)		
Material liggyta	50 % Bomull, 50 % Polyester			100 % Polyester			100 % Bomull		
Material	95% Polyester, 5 % Rayon Polyuretan 50 % Polyester, 50 % Bomull 100 % Polyester								
Absorptionsskikt									
Spärrskikt									
Bäddflikar									
Undersidan									
Antal produkter/förpackning	1 st								
Antal tvättar (hushållstvätt, ej industritvätt)	Ca 450 st								
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning								
Förvaring	Rumstemperatur								
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.								

Hjälpmedel i hemmet • Sitta, Ligga och Komfort • Lakansskydd


Art.nr: 1169-S, 1169-M, 1169-L,  
12221-S, 12221-M, 12221-L,  
1168.S, 1168-M, 1168-L

### Användaranvisning

- Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med Sanicare loggan mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används
- Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens bredd.

Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta eller lyfta brukare med!

### Symboler:

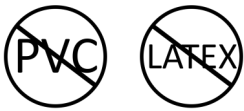

Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art.nr. 1169-S, 1169-M, 1169-L, 12221-S, 12221-M, 12221-L, 1168.S, 1168-M, 1168-L



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Observera att lakansskyddet inte är till för att förflytta/positionera brukare med! Det finns en risk för att brukaren kan falla ur sängen om en förflyttning ändå görs! Bädda alltid in bäddflikarna. Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



\*Certifikat nr står på produkten



Swereco AB  
Vagnvägen 4  
364 42 Lenhovda

