


Borttagare för hudstaplers




Användningsområden

Borttagaren är speciellt utvecklad för att ta bort hudstaplers efter användning av Hudstapler F-35RB och F-35WB.


Hur borttagaren används

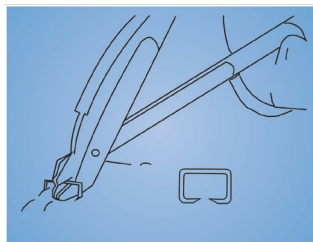

1. Sätt in den främre, nedre delen av borttagaren under staplern.

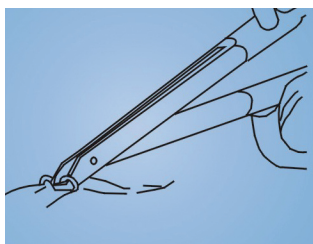

2. Tryck ihop det övre och undre handtaget hårt tills de är helt slutna.

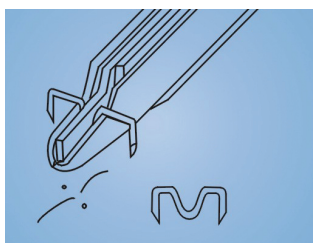

3. Tag bort den helt omformade staplern genom att lyfta vertikalt ut från huden.

Orderinformation

Art.nr.	Beskrivning	Förp.
C/W	Borttagare av hudstapler	20 st

STERILE EO  0123 ISO 134 85