

Hudstapler för engångsbruk



Användningsområden


Hudstaplern kan användas för förslutning av sår vid de flesta kirurgiska operationer.

- Thorax kirurgi
- Mag/tarm kirurgi
- Kardiovaskulär kirurgi
- Gynekologisk kirurgi
- Urologisk kirurgi
- Neurologisk kirurgi


Fördelar med att använda hudstapling:

- En hudstapel är precis lika stark som en sutur
- Snabbheten med metoden kan väl mäta sig med suturering, när det sys från sida till sida
- Hudstaplern efterlämnar alltid ett fint kosmetiskt resultat
- Tillslutningsmetoden minskar risken för infektioner
- Dessutom är det en långt billigare metod jämfört med suturering


Hur staplern används

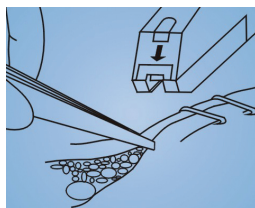

1. Ta tag om och lyft upp huden på båda sidor av såret, kläm med en lämplig pincett så att båda sidorna möter varandra.

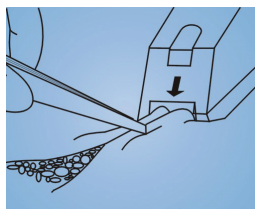

2. Säkerställ att underdelen av staplern är placerad i lämplig vinkel mot sårets mittlinje och att staplern är placerad vertikalt mot snittets längdriktning. Tryck därefter staplern försiktigt mot snittet till dess att fram kanten befinner sig i linje med snittets mittlinje. VARNING! Tryck inte staplern för tätt mot snittet, det kan göra det svårt att ta bort clipsen!

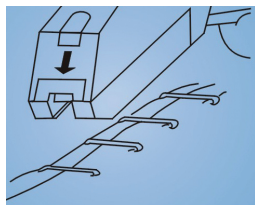

3. Tryck ihop handtaget och släpp det först när det hörs ett "klick". Dra sedan staplern bakåt en bit och förbered för att sätta nästa clips.

Modeller	F-35R	F-35WB
Diameter på clips	0.5mm	0.6mm
Storlek efter förslutning	5.9mm*3.9mm	7.2mm*4.9mm
Antal clips	35 st	35 st
Sterilisering	ETO	ETO
Hållbarhetstid	3 år	3 år

Orderinformation

Art.nr.	Beskrivning	Förp.
F-35R	Regular, bredd 5,9 mm, höjd 3.9 mm	5 st
F-35WB	Wide, bredd 7,2 mm, höjd 4,9 mm	5 st

STERILE EO 0123 ISO 134 85