



Armbågsortos ROM

Bruksanvisning

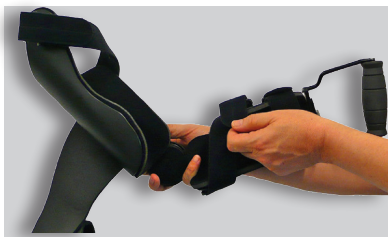

1. Förberedelse:

Öppna kardborrbanden. Om det är möjligt låt banden sitta kvar i spännet och se till att fjäderspänningen är deaktiverad. Det blir då mycket enklare att sätta på ortosen och späna banden.

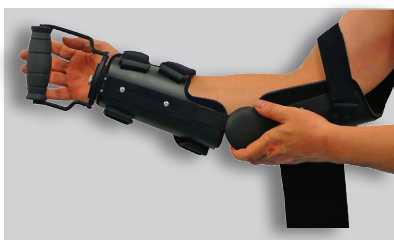

2. Applicering:

För armen genom banden. Skalen på över- och underarm kan individuellt regleras i förhållande till leden. Lossa enbart skruvarna med en insexnyckel och placera skalen så att bästa komfort uppnås.



3. Placering:

Om det är möjligt så böj armen i 90°. Centrumpunkten på ortosleden skall då motsvara centrum av armbågsleden.



4. Fastsättning:

Spänn banden enligt följande rekommenderade sekvens:

- a) översta smala bandet
- b) underarmsbandet närmast leden
- c) nedre (distala) underarmsbandet
- d) det breda bandet på överarmen



JHInova AB

