

Armbågsortos ROM

Indikationer:

Post-traumatisk eller post-operativ immobilisering eller kontrollerad rörlighet av armbågsleden.

Särdrag:

- Justerbar immobilisering mellan -15° och 105°
- Justerbara stopp för extension och flexion
- All justering utan verktyg
- Individuellt anpassningsbara skal och band
- Handtaget fritt justerbart för att passa underarmens längd

Med handtag:

- Fast handtag
- Roterbart handtag fritt justerbart mellan 70° pronation och 70° supination samt låsbart i varje position



Artikelnummer:

ROM vänster
ROM Höger

850A-L

850A-R

Separat handtag fast (vå el hö)

991A (L - R)

Roterbart handtag (vå el hö)


990A (L - R)



Armbågsortos ROM

Inställning:

- Genom att placera stoppstiften ① i valfritt hål, kan extensions- ④ och flexions- ⑤ omfånget begränsas/ökas i 15° steg.
- Extensionsstoppet kan steglöst justeras till -15° hyperextension genom att använda finjusteringskruven ②.
- För att immobilisera i en önskad vinkel skall stoppstift ① placeras i området ③.
- Obegränsad flexion kan fås genom att ett av stoppstiften placeras i ∞ positionen ⑥.
- Genom att kombinera de olika inställningsmöjligheterna kan immobilisering justeras fritt i alla ledpositioner
- Båda stoppstiften måste alltid sitta i något av hålen.
- Locket över leden skall alltid vara stängt efter att inställningarna har gjorts.

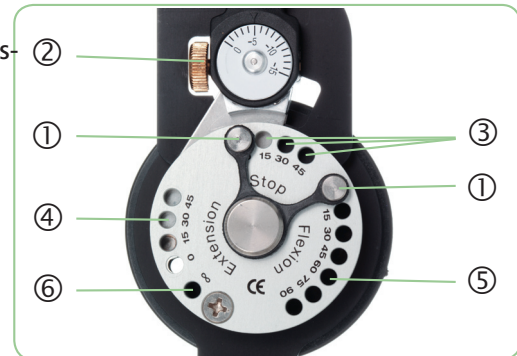


• Användning av handtag:

Om handtag skall användas kan detta monteras i efterhand. Lossa enbart skruvarna på underarmsskalet och sätt dit handtaget och skruva tillbaka skruvarna. Innan skruvarna fixeras, justera längden på handtaget så att det passar armen.



• Justering av det roterbara handtaget:

Genom att lossa skruven på handtaget kan det fritt placeras mellan 70° pronation och 70° supination och därefter fixeras i den önskade positionen.

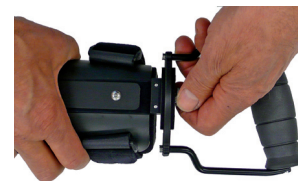

Beskrivning	Material
handtag	latex-fritt skummaterial
band	velour PA
polster	velour PA