



taluair®

## Bruksanvisning

### Funktionell Ankelortos

taluair®



JHInova AB

...

taluair®

## Introduktion

Funktionella U-formade ankelortoser har visat sig vara mycket effektiva vid rehabilitering av skador och degenerativa sjukdomar i fotleden.

Med ledning av det diagnostiska resultatet avgör läkaren om hen ska påbörja operativ eller konservativ behandling. Oberoende av detta har erfarenheten visat att en funktionell rehabilitering är en överlägsen fixering.

taluair® stöder fotleden medialt och lateralt (på båda sidorna) och tillåter flexion och extension i största möjliga utsträckning, så att ett normalt rörelseförlopp blir möjligt.

Luftkammrarna fyller ut skålarna, så att obehagligt tryck undviks. En kraftigare madrassering vid fotknölna ger högre tryck i den nedre tredjedelen av anliggningsytan. Trycket som avtar nerifrån och uppåt medverkar till att snabbare avhjälpa svullnader.

Luftkammrarna består av hudvänlig polyuretanfolie och inuti en kärna av PU-skum. Det är ett material som har visat sig fungera väl inom det kliniska området. Hela produkten är fri från PVC och mjukmedel. Vi rekommenderar ändå att man bär en absorberande strumpa under skenan.

## Användning

Den anatomiskt formade taluair® luftkammarskenan har utformats för att vara ett effektivt medicinskt hjälpmedel för funktionell rehabilitering. För att säkerställa bästa passform finns taluair® i två storlekar för respektive höger och vänster fotled.

taluair®

## Indikationer/kontraindikationer

Läkaren avgör vilken behandling som krävs beroende på skadans art.

Vanligtvis kan taluair® användas vid skador på ligamenten i fotleden, kraftiga stukningar, vid kronisk instabilitet och vid efterbehandling av fotledsfrakturer och ligamentrupturer. taluair® rekommenderas inte vid några andra fotledsproblem än de tidigare nämnda.

## Declaration of conformity

taluair® luftkammarskena motsvarar de grundläggande kraven för "European Directive 93/42/EEC for Medical Products". Den är CE märkt i överensstämmelse med detta direktiv.

## Innehåll

taluair® kommer färdig för användning tillsammans med bruksanvisning, taluair® består av en u-formad skena med luftkuddar på var sida, 2 kardborrband och ett hälband. Var god kontrollera att produkten är fullständig.

## Säkerhetsnoteringar

- ! Var god följ bruksanvisningen noga.
- ! Använd en absorberande strumpa under taluair®.
- ! Använd inte en defekt taluair®
- ! Se till att du får bästa individuella passformen genom att följa instruktionen "individuell anpassning".
- ! Använd en taluair® som passar din storlek.

## Val av storlek

taluaiR® finns i två storlekar för höger och vänster fotled som visas i tabellen nedan. Färgen är svart. Genom att justera hälbandet kan taluaiR® anpassas till olika fotbredder och, om så krävs, till olika grader av svullnad.

Kroppslängd	taluaiR® storlek	Art. nr.
upp till 165 cm	small/medium-höger	600MS-R
	small/medium-vänster	600MS-L
längre än 165 cm	large-höger	600LS-R
	large-vänster	600LS-L

## Individuell anpassning

Vi rekommenderar att använda absorberande strumpor. För att sätta på taluaiR® var god följ de 4 stegen nedan. Detta för att bäst utnyttja taluaiR® rehabiliterande egenskaper.

## Avyttring

taluaiR® innehåller inga giftiga eller förorenande substanser. Förutsatt att den inte är infekterad av bakterier kan den återvinnas.

### Steg 1



Inställning av hälbredden: Luftkammarens nedre ändar kan lyftas. Ställ sedan in bredden och fixera med hjälp av kardborrbanden. Hälbandet måste alltid befinna sig i mitten.

### Steg 2



Sätt först på det nedre bandet. Därefter tar du på dig skon och snörar den..

### Steg 3



Sedan sätter du på det övre bandet. Se till att sidodelarna ligger an rätt mot fotleden utan att trycka.

### Steg 4



Lossa bara kardborrbanden för att ta av skenan. Då bibehålls anpassningen till foten.

## Skötsel

Produkten är inte steril och kan inte steriliseras. Använd endast milda rengöringsmedel. Alla delar av skenan, som för övrigt är underhållsfri, kan tvättas i vatten med mildt rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel. Låt skenan lufttorka eller torka med handduk. Om möjligt skall taluaiR® endast användas av en person. Om någon mer skall använda skenan måste skenan kontrolleras noga så att den fortfarande är fullt användbar. Om någon del av skenan är skadad kan taluaiR® inte användas och måste slängas.

## Garanti

Garantin täcker användandet av ortosen under 3 månader. Ortosen är en medicinsk rehabiliteringsprodukt och skall ej användas för några andra ändamål än de beskrivna i produktinformationen. All modifiering eller applikation som inte är beskriven i produktinformationen kräver skriftlig godkännande av albrecht GmbH. Vid avsaknad av sådant godkännande gäller ej garantin. Om någon led eller komponent skall användas individuellt, måste de användas ändamålsenligt. Om någon del eller komponent ändras eller modifieras (t.ex. borrar för kompletterade fixering) fransäger sig producenten garantiansvaret och detsamma gäller om QM-etiketten tas bort.

## Tekniska data / Material

Beskrivning	Material
luftkuddar	PU
hälband	PA
kardborrband	PA

## Kontaktinformation

JHInova AB

Flötviksvägen 17  
S-165 72 Hässelby  
Tel: + 46 (0) 8 564 441 20  
Fax: +46 (0) 8 739 25 33  
mail: info@jhinova.com  
Internet: www.jhinova.se

