



INDIVIDUELLT
REGLERBART TRYCK

AVLASTAR DET IRRITERADE,
ÖVERBELASTADE SENFÄSTET

SITTER PÅ PLATS VID
APPLICERING OCH ANVÄNDNING

ENKELT ATT SÄTTA
PÅ SJÄLV





PUSH SPORTS

EPICONDYLIT- ORTOS

Push Sports Epicondylitortos är lösningen vid tennis- eller golfarm. När underarmsmuskelnas senfäste vid armbågen överbelastad på grund av abrupt, kraftig eller långvarig belastning blir den ofta öm och smärtsam. Med hjälp av dynan ger epicondylitortosen tryck på de specifika underarmsmusklerna och avlastar därmed det angripna senfästet för armbågsmusklerna. Trycket byggs gradvis upp med hjälp av dynans elastiska material och en liten elastisk underdel på bandet. Detta minskar smärtbesvären, vilket gör att man kan träna med en säker känsla.

NÄR SKALL DEN ANVÄNDAS?

-  Vid tennisarm (epicondylitis lateralis):
en skada som uppstått till följd av
överbelastning i samband med sträckning
av handleden tillsammans med fästet
på armbågens utsida
-  Vid golfarm (epicondylitis medialis):
en skada som uppstått till följd av
överbelastning i samband med böjning
av handleden tillsammans med fästet
på armbågens insida



**ONE
SIZE**