

Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel • Nattdräkter Unisex


Art nr: 6010, 6011, 6012, 6013,  
6014, 6015, 6016

Sanicare Nattdräkt med dragkedja i grenen och korta ben passar till personer som har en demenssjukdom. Nattdräkten underlättar även för vården av patienter med demenssjukdom. Genom att inkontinenshjälpmedlet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn.

Den heltäckande nattdräkten är öppningsbar i grenen och försvårar för patienten att själv komma åt och ta av sig inkontinensskyddet. Nattdräkt med dragkedja i hela grenen gör också att byten av inkontinensskydd blir enklare, framför allt på sängliggande brukare, utan att brukaren måste sättas upp i säng. Nattdräkten har korta ben och passar både män och kvinnor.



Varumärke	Sanicare						
Benämning	Sanicare nattdräkt, korta ben, dragkedja gren						
Art nr	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016
Storlek	XXS/130	XS/150	S	M	L	XL	XXL
Mått höft	70 cm	78 cm	86 cm	94 cm	102 cm	110 cm	118 cm
Mått benöppning	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm
Mått byst	80 cm	85 cm	90 cm	96 cm	104 cm	112 cm	120 cm
Vikt/produkt	230 g	260 g	300 g	300 g	400 g	499 g	499 g
Färg	Vit						
Antal produkter/ förpackning	1 st						
Material	93 % bomull, 7 % elastan						
Krympning	<5%						
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt), tvättas i tvättpåse						
Kasseras	Textilåtervinning alt brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning						
Förvaring	Rumstemperatur						
Övrig information	Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.						

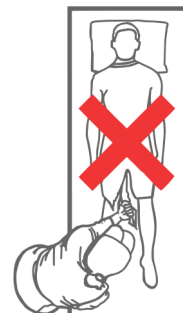

Dra inte i tyget vid på/av klädnad



## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvåtråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr. 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016

## Användaranvisning

- Prova noggrant ut rätt storlek. Är måtten mellan två storlekar - ta den större.
- Dra nattdräkten över huvudet på brukaren och stäng grenen med hjälp av dragkedjan.
- OBS! Dra inte i tyget vid på/av klädnad - tyget tål inte kraftig dragkraft.
- Om brukaren kan ska på/av klädnad ske stående. Annars be brukaren lyfta på rumpen för att få fram tyget över rumpen, alternativt vänd på brukaren och dra över tyget över rumpen.



Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion. Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Se till att knappar ej är lösa/lossnat - risk för kvävning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Dra inte i nattdräktens tyg vid påklädning, kan orsaka slitage/skador på tyget samt sömmar. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314



\*Certifikat nr står på produkten



# SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240



Swereco AB,  
Vagnvägen 4,  
364 42 Lenhovda