


Sanicare Nattdräkt med öppning på båda axlarna och korta ben passar till personer som har en demenssjukdom. Nattdräkten underlättar även för vården av patienter med demenssjukdom. Genom att inkontinenshjälpmedlet sitter skyddat minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn. Den heltäckande nattdräkten är öppningsbar på båda axlarna och försvårar för patienten att själv komma åt och ta av sig inkontinensskyddet. Nattdräkten har korta ben och passar både män och kvinnor.

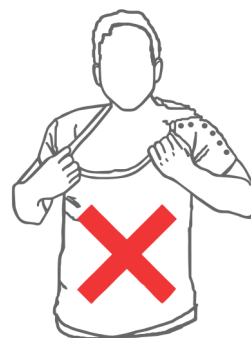

Dra inte i tyget vid på/av klädnad

Varumärke	Sanicare			
Benämning	Sanicare nattdräkt, korta ben, knäppning båda axlar			
Art nr	<b>6111</b>	<b>6112</b>	<b>6113</b>	<b>6114</b>
Storlek	S	M	L	XL
Höftmått	86 cm	94 cm	102 cm	110 cm
Mått benöppning	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
Mått byst	86 cm	94 cm	100 cm	110 cm
Vikt/produkt	300 g	300 g	400 g	499 g
Färg	Vit			
Antal produkter/förpackning	1 st			
Material	93 % bomull, 7 % elasthan			
Krympning	<5%			
Antal tvättar	Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)			
Kasseras	Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning			
Förvaring	Rumstemperatur			
Övrig information	Produkten innehåller inte parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.			

## Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvåtråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 6111, 6112, 6113, 6114

## Användaranvisning

- Prova noggrant ut rätt storlek.
- Öppna nattdräktens tryckknappar och klä på nattdräkten genom uringningen.
- OBS! Dra inte i tyget vid på/av klädnad - tyget tål inte kraftig dragkraft.



Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion. Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Se till att knappar ej är lösa/lossnat – risk för kvävning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Dra inte i nattdräktens tyg vid påklädnad, kan orsaka slitage/skador på tyget samt sömmar. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

EUDAMED



SRN SE-MF-000033314

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



Medtech



Swereco AB,  
Vagnvägen 4,  
364 42 Lenhovda

# SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240