

Kryckkäpp Flex

Avsedd användning: Kryckkäpp Flex är avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion

Benämning kryckkäpp	Artikel-nummer	Färg (armbygel)	Krycklängd (cm)	Max brukarvikt (kg)	Produktvikt (kg)	Monterad isdubb
Flex barn	126950	grå	46-58	50	0,3	-
Flex barn	126955	blå	46-58	50	0,3	-
Flex mindre	126960	grå	58-80	100	0,4	-
Flex mindre	126963	grå	58-80	100	0,5	Isdubb Spets
Flex mindre	126965	blå	58-80	100	0,4	-
Flex	127000	grå	75-97	140	0,5	-
Flex	127003	grå	75-97	140	0,6	Isdubb Spets
Flex	127004	röd	75-97	140	0,5	-
Flex	127005	blå	75-97	140	0,5	-
Flex	127008	grå	75-97	140	0,6	Isdubb Krona
Flex	127009	vit	75-97	140	0,5	-
Flex kort	127040	grå	58-80	140	0,4	-
Flex kort	127043	grå	58-80	140	0,5	Isdubb Spets
Flex lång	127050	grå	90-112	120	0,5	-
Flex lång	127053	grå	90-112	120	0,6	Isdubb Spets
Flex lång	127054	röd	90-112	120	0,5	-
Flex lång	127055	blå	90-112	120	0,5	-
Flex lång	127058	grå	90-112	120	0,6	Isdubb Krona
Flex fast längd	127060	grå	105	140	0,5	-

Artikel (Artikelnummer)	Tillbehör	Reservdelar
Doppsko 19-20 mm (120750/120750K)		x
Doppsko 21-23 mm (120760)		x
Isdubb Spets (123300/123300K)	x	x
Isdubb Krona (123350/123350K)	x	x
Kryckpolstring (124700)*	x	
Käpphållare Flex (124885/124885K)*	x	
Käpphållare Ingrid (257467)*	x	
Käpphållare till krycka och käpp (158)*	x	

*Markerade artiklar är konsumentprodukter och är inte klassificerade som medicintekniska produkter



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-08 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalsmedel/kryckkappar>

Tekniska data

- Material: kryckrör i aluminium, armbygel i polypropen, doppsko i naturgummi.
- Förväntad livslängd: 3 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning.
- Förvaring: förvara produkten i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus eller extrem värme/kyla. Rekommenderas att placeras stående eller liggande på en stabil yta för att förhindra att kryckan deformeras.
- Återvinning och avfall: kryckan återvinns som metallskrot.

Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av kryckan får göras.
- ⚠ Kryckans förväntade livslängd är tre år. Efter tre år bör inte kryckan användas, då det finns risk för utmattning om kryckan använts kontinuerligt under längre tid. Kryckans utgångsdatum är angivet på produktetiketten placerad på kryckkåppen.
- ⚠ Vid tecken på slitage eller skada på kryckan får den inte användas. Kontrollera regelbundet att tappen på höjdjusteringen inte glappar. Uppmärksammas detta får kryckan inte användas.
- ⚠ Kryckan får aldrig användas för att stoppa en hissdörr eller liknande då detta riskerar att kryckan skadas och kan gå av.
- Maximal brukarvikt enligt tabell ovan får ej överskridas (gäller även vid användning av två kryckor).
 - Vid snö- och isigt underlag, rekommenderas att isdubb används tillsammans med kryckan. Gå mycket försiktigt även med isdubb, då viss halkrisk kvarstår.
 - En blöt eller smutsig doppsko kan innebära halkrisk. Vid förflyttning från utomhus- till inomhusmiljö, tänk på att torka av doppskon vid behov.
 - Undvik om möjligt användning på lutande, ojämna eller hala underlag. Detta kan påverka kryckans grepp mot underlaget.
 - Använd hiss istället för trappor när det är möjligt. Låt förskrivaren demonstrera gång och säker användning av kryckan i trappa. Om en trappa måste användas, håll kryckan vertikalt och inte vinklad mot underlaget. Använd även räcket som extra stöd.

Inställningsanvisning

- Kryckan bör justeras av person med relevant kompetens för korrekt anpassning efter brukarens förutsättningar.
- Höjden justeras med tryckknappen, se figur 1. Kryckan ska stå i upprätt position vid justering.
- Armbågen bör ha en lätt böjning framåt/nedåt (ca 30°) vid korrekt höjd, se figur 2.
- Rådgör alltid med person med relevant kompetens vid frågor kring höjdjustering.
- Vid montering av isdubb Spets (art.nr 123300/123300K) eller Krona (art.nr 123350/123350K) se separat bruksanvisning som finns på Swerecos hemsida.

Användaranvisning

- Placera kryckan cirka 5–10 cm utanför och något framför foten för god stabilitet.
- Gå med jämn rytm och undvik att luta dig för mycket framåt eller åt sidorna.
- Använd kryckor enligt vårdgivarens instruktioner (en- eller tvåsidigt bruk, olika gångmönster vid partiell belastning, osv).
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör kryckan med mild tvållösning (pH 5–9) och mjuk trasa regelbundet. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten.
- Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Produkter som rekonditioneras ska inkludera en fullständig kontroll enligt instruktionen nedan.



Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- Doppskon inte är sliten eller skadad. En sliten eller skadad doppsko ska bytas ut.
- Tryckknappen för höjdjustering fjädrar tillbaka som den ska. Om tryckknappen inte fjädrar tillbaka ska kryckan tas ur bruk.
- Inga sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage har uppstått på produkten. Hittas sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage ska kryckan tas ur bruk.

Krycka 127060 Flex fast längd kan kapas för att justera längden på kryckan. Det ska alltid utföras av behörig fackman

- Vid behov kan kryckröret kapas för att uppnå rätt längd.
- Detta görs genom att avlägsna doppskon och sedan kapa kryckröret nerifrån.
- Montera tillbaka doppskon korrekt genom att trycka den hela vägen till botten.

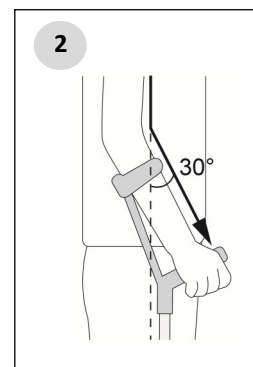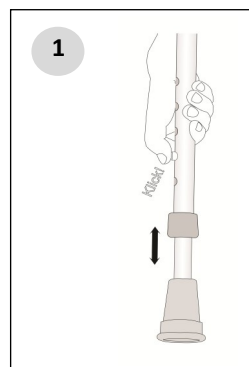

Produktens partinummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produktens utgångsdatum



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare



Produktens artikelnummer



Maximal brukarvikt



Varning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-08 ver 02

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjelpmedel/kryckkappar>