

Kryckkäpp Ergo

Avsedd användning: Kryckkäpp Ergo är avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion

Benämning kryck-käpp	Artikelnummer	Material (handtag)	Krycklängd (cm)	Max brukar-vikt (kg)	Produktvikt (kg)	Monterad isdubb
Flex rak mjuk	127200	TPE	75-97	140	0,6	-
Flex rak mjuk kort	127210	TPE	58-80	140	0,5	-
Flex rak mjuk lång	127250	TPE	90-112	120	0,6	-
Flex rak mjuk fastl.	127260	TPE	105	140	0,6	-
Flex Ergo H	127300	Polypropen	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo H kort	127310	Polypropen	58-80	140	0,5	-
Flex Ergo H lång	127350	Polypropen	90-112	120	0,6	-
Flex Ergo H fastl.	127360	Polypropen	105	140	0,6	-
Flex Ergo H mjuk	127400	TPE	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo H mjuk	127403	TPE	75-97	140	0,7	isdubb spets
Flex Ergo H mjuk kort	127410	TPE	58-80	140	0,5	-
Flex Ergo H mjuk lång	127450	TPE	90-112	120	0,7	-
Flex Ergo H mjuk lång	127453	TPE	90-112	120	0,7	isdubb spets
Flex Ergo H mjuk fastl.	127460	TPE	105	140	0,6	-
Flex Ergo V	127500	Polypropen	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo V kort	127510	Polypropen	58-80	140	0,5	-
Flex Ergo V lång	127550	Polypropen	90-112	120	0,6	-
Flex Ergo V fastl.	127560	Polypropen	105	140	0,6	-
Flex Ergo V mjuk	127600	TPE	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo V mjuk	127603	TPE	75-97	140	0,6	isdubb spets
Flex Ergo V mjuk kort	127610	TPE	75-97	140	0,5	-
Flex Ergo V mjuk	127650	TPE	75-97	140	0,6	-
Flex Ergo V mjuk	127653	TPE	75-97	140	0,7	isdubb spets
Flex Ergo V mjuk fastl.	127660	TPE	105	140	0,6	-

V — Vänster H — Höger

Artikel (Artikelnummer)	Tillbehör	Reservdelar
Doppsko 19-20 mm (120750/120750K)		x
Doppsko 21-23 mm (120760)		x
Isdubb Spets (123300/123300K)	x	x
Isdubb Kroma (123350/123350K)	x	
Kryckpolstring (124700)*	x	
Käpphållare Flex (124885/124885K)*	x	
Käpphållare Ingrid (257467)*	x	
Käpphållare till krycka och käpp (158)*	x	

*Markerade artiklar är konsumentprodukter och är inte klassificerade som medicintekniska produkter



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-09 ver 03

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/kryckkappar>

Tekniska data

- Material: kryckrör i aluminium, armbygel i PA akulon, doppsko i naturgummi, handtag se tabell på föregående sida.
- Förväntad livslängd: 3 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning.
- Förvaring: förvara produkten i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus eller extrem värme/kyla. Rekommenderas att placeras stående eller liggande på en stabil yta för att förhindra att kryckan deformeras.
- Återvinning och avfall: kryckan återvinns som metallskrot.

Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av kryckan får göras.
- ⚠ Kryckans förväntade livslängd är tre år. Efter tre år bör inte kryckan användas, då det finns risk för utmattnings- eller sprickor i kryckan. Kryckans utgångsdatum är angivet på produktetiketten placerad på kryckkåpan.
- ⚠ Vid tecken på slitage eller skada på kryckan får den inte användas. Kontrollera regelbundet att tappen på höjdjusteringen inte glappar. Uppmärksammas detta får kryckan inte användas.
- ⚠ Kryckan får aldrig användas för att stoppa en hissdörr eller liknande då detta riskerar att kryckan skadas och kan gå av.
- Maximal brukarvikt enligt tabell ovan får ej överskridas (gäller även vid användning av två kryckor).
 - Vid snö- och isigt underlag, rekommenderas att isdubb används tillsammans med kryckan. Gå mycket försiktigt även med isdubb, då viss halkrisk kvarstår.
 - En blöt eller smutsig doppsko kan innebära halkrisk. Vid förflyttning från utomhus- till inomhusmiljö, tänk på att torka av doppskon vid behov.
 - Undvik om möjligt användning på lutande, ojämna eller hala underlag. Detta kan påverka kryckans grepp mot underlaget.
 - Använd hiss istället för trappor när det är möjligt. Låt förskrivaren demonstrera gång och säker användning av kryckan i trappa. Om en trappa måste användas, håll kryckan vertikalt och inte vinklad mot underlaget. Använd även räcket som extra stöd.

Inställningsanvisning

- Kryckan bör justeras av person med relevant kompetens för korrekt anpassning efter brukarens förutsättningar.
- Höjden justeras med tryckknappen, se figur 1. Kryckan ska stå i upprätt position vid justering.
- Armbågen bör ha en lätt böjning framåt/nedåt (ca 30°) vid korrekt höjd, se figur 2.
- Rådgör alltid med person med relevant kompetens vid frågor kring höjdjustering.
- Vid montering av isdubb Spets (art.nr 123300/123300K) eller Krona (art.nr 123350/123350K) se separat bruksanvisning som finns på Swerecos hemsida.

Användaranvisning

- Placera kryckan cirka 5–10 cm utanför och något framför foten för god stabilitet.
- Gå med jämn rytm och undvik att luta dig för mycket framåt eller åt sidorna.
- Använd kryckor enligt vårdgivarens instruktioner (en- eller tvåsidigt bruk, olika gångmönster vid partiell belastning, osv).
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Rengöring och rekonditionering

- Rengör kryckan med mild tvällösning (pH 5–9) och mjuk trasa regelbundet. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten.
- Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Produkter som rekonditioneras ska inkludera en fullständig kontroll enligt instruktionen nedan.



Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- Doppskon inte är sliten eller skadad. En sliten eller skadad doppsko ska bytas ut.
- Tryckknappen för höjdjustering fjädrar tillbaka som den ska. Om tryckknappen inte fjädrar tillbaka ska kryckan tas ur bruk.
- Inga sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage har uppstått på produkten. Hittas sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage ska kryckan tas ur bruk.

Följande kryckor; 127260, 127360, 127460, 127560 samt 127660 kan kapas för att justera längden på kryckan. Det ska alltid utföras av behörig fackman

- Vid behov kan kryckröret kapas för att uppnå rätt längd.
- Detta görs genom att avlägsna doppskon och sedan kapa kryckröret nerifrån.
- Montera tillbaka doppskon korrekt genom att trycka den hela vägen till botten.

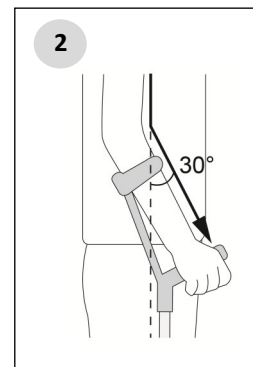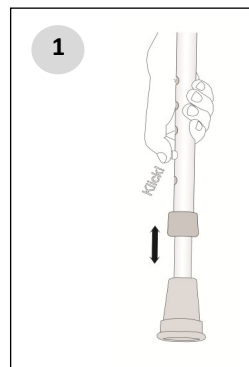

Produktens partinummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produktens utgångsdatum



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare



Produktens artikelnummer



Maximal brukarvikt



Varning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-09 ver 03

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/kryckkappar>