

Kryckkäpp Robust

Avsedd användning: Kryckkäpp Robust är avsedd att brukas som gångstöd för personer med nedsatt rörelsefunktion

Benämning kryckkäpp	Artikel-nummer	Material (handtag)	Krycklängd (cm)	Max brukarvikt (kg)	Produkt-vikt (kg)	Monterad isdubb
Flex Robust	127700	Polypropen	105	200	1,3	-
Flex Robust lång	127702	Polypropen	116	200	1,4	-
Flex Robust höger	127705	Ek	105	200	1,3	-
Flex Robust vänster	127710	Ek	105	200	1,3	-

Artikel (Artikelnummer)	Tillbehör	Reservdelar
Doppsko 21-23 mm (120760)		x
Isdubb Spets (123300/123300K)	x	
Isdubb Krona (123350/123350K)	x	
Käpphållare Flex (124885/124885K)*	x	
Käpphållare Ingrid (257467)*	x	

*Markerade artiklar är konsumentprodukter och är inte klassificerade som medicintekniska produkter



Tekniska data

- Material: kryckrör i stål, armbygel i polyamid, doppsko i naturgummi, handtag se tabell ovan.
- Förväntad livslängd: 3 år vid normal användning i enlighet med denna bruksanvisning.
- Förvaring: förvara produkten i rumstemperatur, skyddat från direkt solljus eller extrem värme/kyla. Rekommenderas att placeras stående eller liggande på en stabil yta för att förhindra att kryckan deformeras.
- Återvinning och avfall: kryckan återvinns som metallsrot.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-10 ver 03

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/kryckkappar>

Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av kryckan får göras förutom kapning för korrekt höjd.
- ⚠ Kryckans förväntade livslängd är tre år. Efter tre år bör inte kryckan användas, då det finns risk för utmattning om kryckan använts kontinuerligt under längre tid. Kryckans utgångsdatum är angivet på produktetiketten placerad på kryckkåppen.
- ⚠ Vid tecken på slitage eller skada på kryckan får den inte användas. Kontrollera regelbundet att tappen på höjdstjusteringen inte glappar. Uppmärksammas detta får kryckan inte användas.
- ⚠ Kryckan får aldrig användas för att stoppa en hissdörr eller liknande då detta riskerar att kryckan skadas och kan gå av.
- Maximal brukarvikt enligt tabell ovan får ej överskridas (gäller även vid användning av två kryckor).
 - Vid snö- och isigt underlag, rekommenderas att isdubb används tillsammans med kryckan. Gå mycket försiktigt även med isdubb, då viss halkrisk kvarstår.
 - En blöt eller smutsig doppsko kan innebära halkrisk. Vid förflyttning från utomhus- till inomhusmiljö, tänk på att torka av doppskon vid behov.
 - Undvik om möjligt användning på lutande, ojämn eller hala underlag. Detta kan påverka kryckans grepp mot underlaget.
 - Använd hiss istället för trappor när det är möjligt. Låt förskrivaren demonstrera gång och säker användning av kryckan i trappa. Om en trappa måste användas, håll kryckan vertikalt och inte vinklad mot underlaget. Använd även räcket som extra stöd.

Inställningsanvisning

- Kryckröret ska kapas för att uppnå rätt längd, kapning får endast utföras av behörig fackman.
- Rådgör alltid med person med relevant kompetens vid frågor kring kapning.

Kapning, se figur 1 :

1. Avlägsna doppskon.
2. Kapa stålröret med bågfil eller en rörkap. Snittet ska vara rakt.
3. Tryck tillbaka doppskon korrekt genom att trycka den hela vägen till botten.
4. Armången bör ha en lätt böjning framåt/nedåt (ca 30°) vid korrekt höjd, se figur 2.

Justering av handtag:

- Krycka 127705 samt 127710 har justerbart handtag och kan anpassas till brukarens hand, se figur 3. Använd en insexnyckel med mått 6 mm (NV6).
- Vid montering av isdubb Spets (art.nr 123300/123300K) eller Krona (art.nr 123350/123350K) se separat bruksanvisning som finns på Swerecos hemsida.

Användaranvisning

- Placera kryckan cirka 5–10 cm utanför och något framför foten för god stabilitet.
- Gå med jämn rytm och undvik att luta dig för mycket framåt eller åt sidorna.
- Använd kryckor enligt vårdgivarens instruktioner (en- eller tvåsidigt bruk, olika gångmönster vid partiell belastning, osv).
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och, vid allvarliga incidenter, även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.


Rengöring och rekonditionering

- Rengör kryckan med mild tvållösning (pH 5–9) och mjuk trasa regelbundet. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten.
- Desinficera vid behov i avsedd desinfektionsutrustning vid 85°C i minst 3 minuter för att säkerställa hygienisk användning.
- Produkter som rekonditioneras ska inkludera en fullständig kontroll enligt instruktionen nedan.

Underhåll

Kontrollera regelbundet att:

- Doppskon inte är sliten eller skadad. En sliten eller skadad doppsko ska bytas ut.
- Inga sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage har uppstått på produkten. Hittas sprickor, deformationer eller andra tecken på slitage ska kryckan tas ur bruk.

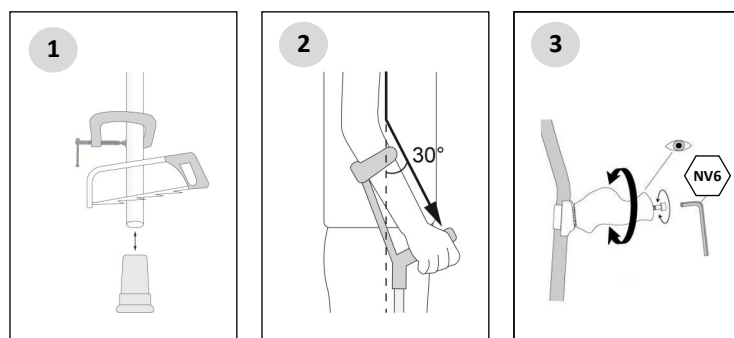

Produktens partinummer



Produkten är CE-märkt i enlighet med med Förordning (EU) 2017/745



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produktens utgångsdatum



Konsultera bruksanvisning



Tillverkare



Produktens artikelnummer



Maximal brukarvikt



Varning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2025-10 ver 03

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/rorelsehjalpmedel/kryckkappar>