

# Lakansskydd Eldner

## Art nr: 1169-S-M-L

**Avsedd användning:** Lakansskydd Eldner är ett lakansskydd för personer med urinläckage. Lakansskyddet bäddas i sängen och absorberar urin samt skyddar sängens madrass mot urinläckage.

Lakansskyddet har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt och resulterar i en slät bäddyta, utan risk för inre veck.



### Produktvarianter

| Art.nr | Totalyta (cm) | Absorberande yta (cm) | Sängbredd (cm) |
|--------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1169-S | B190xL85      | B90xL85               | 80-105         |
| 1169-M | B215xL85      | B115xL85              | 110-120        |
| 1169-L | B250xL85      | B150xL85              | 140x160        |

### Teknisk data

- Material: 50% bomull och 50% polyester (ligg yta), 95% polyester och 5% rayon (absorptionsskikt), polyuretan (spärrskikt), 50% bomull och 50% polyester (bäddflikar), polyester (undersida)
- Antal/förpackning: 1 st
- Förväntad livslängd: ca 450 tvättar i max 90 °C
- Förvaring: rumstemperatur
- Återvinning och avfall: Textilåtervinning eller brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
- Absorptionskapacitet enligt SS 8760033:2015: 1537 ml (+/- 43 ml)

### Säkerhetsanvisningar

- Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
- Bädda alltid in bäddflikarna.
- Observera att lakansskyddet inte är till för att lyfta brukare med.
- Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk

### Före användning

- Produkten ska tvättas före första användning för att aktivera absorptionsförmågan.
- Placera lakansskyddet i sängen med Sanicare-trycket mot madrassen.
- Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna under madrassen. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används.

**REF** Produktens artikelnummer

Maskintvätt i max 90 °C

Ej kemtvätt

**MD** Produkten är en medicin-teknisk produkt

Tyget tål ej blekning

Torktumling på låg värme

Produkten innehåller inte PVC

Får ej strykas

Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745

Produkten innehåller inte latex

Tål ej kalltvätt

Tillverkare

**SWERECO**

Swereco AB, Vagnvägen 4,  
SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com  
+46 (0)8 5000 5240

#### IFU 2026-06 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.  
<https://www.swereco.com/sokresultat?search=lakansskydd>