

# Saniline Urinflaskor

Art nr: 2901, 2905

**Avsedd användning:** Saniline urinflaskor är avsedda att samla upp urin från personer som har begränsad förmåga att ta sig till toaletten.

## Produktvarianter

Modell	Art.nr	Kapacitet (ml)	Antal/TFP
Man	2901	1000	48
Kvinna	2905	800	60



Urinflaska, man



Urinflaska, kvinna



Urinflaskeshållare med lock

## Reservdelar och tillbehör till artikel 2901

Modell	Art.nr	Reservdelar	Tillbehör
Saniline urinflaskeshållare med lock	2902		x
Reservlock till urinflaska	2903	x	

## Teknisk data

- Material: polyeten (flaska), polypropen (lock), polyeten belagt stål (urinflaskeshållare)
- Antal/förpackning: 1 st
- Förvaring: rumstemperatur
- Förväntad livslängd: 2 år. Produkten skall dock bytas ut om den visar tecken på sprickor, missfärgning eller lukt som inte försvinner efter rengöring.
- Återvinning och avfall: sorteras efter lokal anvisning

## Rengöring och rekonditionering

- Produkten rengörs antingen genom handdisk eller maskinell rengöring.
- Vid handdisk: diska i varmt vatten med rengöringsmedel, skölj noggrant och låt lufttorka upp-och-ned.
- Maskinell rengöring och desinfektion kan utföras i spol- eller diskdesinfektor vid 85 °C i minst 3 minuter.
- Desinfektion ska alltid utföras enligt verksamhetens hygienrutiner.

## Användaranvisningar

- För män kan urinflaskan användas i liggande, sittande och stående position.
- För kvinnor rekommenderas användning i sittande position på sängkanten eller stående, då användning i liggande ställning kan innebära risk för läckage.
- Rengör flaskan efter varje användning.
- Placera ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.
- Skall ej användas som dryckesflaska.
- Vid produktfel kontakta Swereco.

**REF** Produktens artikelnummer

**MD** Produkten är en medicinteknisk produkt

**CE** Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745

**Tillverkare**

**SWERECO**

Swereco AB, Vagnvägen 4,  
SE-364 42 Lenhovda  
www.swereco.com · order@swereco.com  
+46 (0)8 5000 5240

**IFU 2026-10 ver 01**

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.  
<https://www.swereco.com/sjukvard/inkontinenshjalpmedel/urinflaskor>