

NåFram griptång

Avsedd användning: NåFram griptång används av personer med nedsatt rörelseförmåga eller som har svårt att nå saker.

Produktvarianter

Art.nr	Färg	Längd (cm)	Modell	Vikt (g)
151240	Grå	40	Aktiv	190
151250	Gul	50	Aktiv	220
151260	Grön	60	Aktiv	240
151270	Röd	70	Aktiv	270
151280	Blå	80	Aktiv	280
151300	Svart	100	Aktiv	340
151340	Grå	40	Passiv	100
151350	Gul	50	Passiv	120
151360	Grön	60	Passiv	120
151370	Röd	70	Passiv	140
151380	Blå	80	Passiv	150



Produktbeskrivning

- Utrustad med gripgummi på båda klorna, vilket gör det enkelt att greppa föremål.
- I änden av handtaget sitter en magnet som underlättar upplöckning av metallföremål, såsom nycklar och gem från golvet.

Aktiv modell

Den aktiva modellen är avsedd för personer som kan trycka ihop handtaget och hålla det intryckt under hela användningen.

Användning:

1. Placera klorna runt föremålet och håll handtaget intryckt för att behålla greppet.
2. Släpp handtaget – föremålet frigörs då från klorna.

Passiv modell

Den passiva modellen är avsedd för personer som har svårt att hålla handtaget intryckt under hela momentet.

Användning:

1. Tryck ihop handtaget för att öppna klorna i griptångens ände.
2. Placera klorna runt föremålet.
3. Släpp handtaget – klorna stängs automatiskt och greppar föremålet.
4. För att frigöra föremålet, tryck ihop handtaget.

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-32 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/grepphjalpmedel/griptanger>

Teknisk data

Tjocklek rör: 5 mm

Material: Stålrör, högfriktionsplast (hättor aktiv), ABS (handtag)

Förväntad livslängd: 2 år vid normal användning

Förvaring: rumstemperatur

Återvinning och avfall: sorteras som metallsrot, emballage
sorteras efter lokal anvisning

Reservdelar

Hätta, par (Art. nr 151490)

Säkerhetsanvisningar

- Produkten får endast användas enligt avsedd användning. Inga egna anpassningar av produkten får göras.
- Produkten skall inte användas för att:
 - bryta eller skruva med
 - förflytta tunga föremål
 - förflytta heta eller farliga vätskorDå det finns risk att användaren skadas.
- Vid tillbud eller misstänkt funktionsfel ska detta omgående rapporteras till tillverkaren och vid allvarliga incidenter även till relevant myndighet enligt gällande regelverk.

Underhåll

- Regelbunden kontroll av gripgummi. Ett trasigt eller saknat gripgummi påverkar effekten av produkten och kan resultera i att föremålen glider ur griptångens klor.
- Produkten skall regelbundet kontrolleras. Vid tecken på slitage eller skada skall produkten kasseras.

Rengöring

- Rengör produkten med mild tvållösning (pH 5–9) och mjuk trasa regelbundet. Undvik starka kemikalier eller lösningsmedel då det kan skada produkten.
- Vid byte mellan brukare ska griptången rengöras med desinfektionsmedel med >40% isopropylalkohol (ej gripgummit)
- Griptången tål inte varmvatten/ånga över 65°C



Produktens artikelnummer



Produktens utgångsdatum



Produkten är en medicinteknisk produkt



Produkten är CE-märkt i enlighet med Förordning (EU) 2017/745



Produktens partinummer



Tillverkare



Konsultera bruksanvisning

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-32 ver 01

Senaste versionen finns alltid på Swerecos hemsida, under respektive produktflik.
<https://www.swereco.com/hjalpmedel-i-hemmet/grepphjalpmedel/griptanger>